

دستورالعمل جداسازی پلاسما از خون مادر جهت انجام تست NIPT

- ✓ نمونه گیری در دو لوله (6ml) CBC EDTA انجام شود.
- ✓ سانتریفیوژ لوله های خون با دور 3100 RPM و به مدت زمان 10 دقیقه انجام شود.

* حداکثر فاصله زمانی مجاز بین خونگیری تا جداسازی پلاسما 45 دقیقه می باشد.

- ✓ 4.5 الی 5 میلی لیتر پلاسما را با نهایت احتیاط بطوریکه لایه Buffy Coat

آسیب نبیند، جداسازی کرده و در فالتون تک استریل (DNase & RNase

Free) جدید ریخته و تا زمان رسیدن به آزمایشگاه ارجاع باید به صورت فریز

نگهداری و تحویل گردد.